



MATERIAL PARA IMPRESIONES

Speedex[®] NEW

putty . light . medium . universal activator

BITES OF PASSION



 COLTENE[®]



Speedex[®]

putty . light . medium . universal activator

C-SILICONE. SWISS MADE.

Speedex es una silicona C Precondensada probada, confiable y con excelentes propiedades. Obtendrá impresiones de precisión similares a las alcanzables con Siliconas de Adición.

Mezcla simplificada: tres consistencias diferentes con un solo activador universal.

Speedex Ofrece

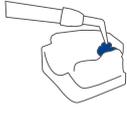
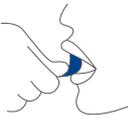
- ESTABILIDAD DIMENSIONAL EXTENDIDA: 7 DÍAS
- TIEMPO CONTROLABLE DE TRABAJO
- PROPIEDADES HIDRÓFILAS: SUPERFICIE ACTIVADA!
- PRECISIÓN OPTIMIZADA
- ALTA RESISTENCIA AL DESGARRO
- EXCELENTE MEMORIA ELÁSTICA (putty y light): 99,8%
- IMPRESIONES DE ALTA PRECISIÓN: EXCELENTE FLUIDEZ
- CALIDAD SUIZA

BENEFICIOS ADICIONALES

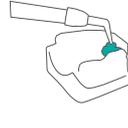
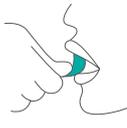
Las sustancias coagulantes o para el tratamiento del dolor y los guantes de látex no ejercen influencia alguna sobre el proceso de fraguado.

TIEMPOS DE TRABAJO CLÍNICO (DOSIFICACIÓN NORMAL)

Speedex light | Tiempo de fraguado $\geq 4:30$ min

$\leq 0:30$ min	$\leq 1:00$ min	$\geq 3:00$ min
		
$\leq 1:30$ min		
23°C		

Speedex medium | Tiempo de fraguado $\geq 6:00$ min

$\leq 0:30$ min	$\leq 1:30$ min	$\geq 4:00$ min
		
$\leq 2:00$ min		
23°C		

de baja viscosidad

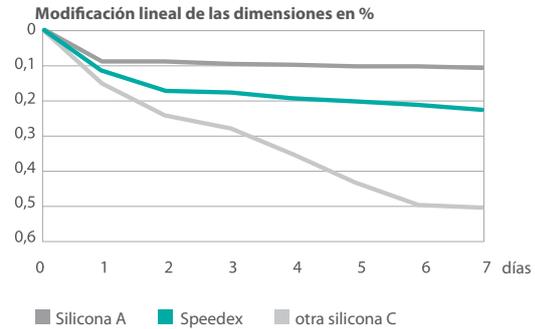


¿POR QUÉ LOS DENTISTAS PREFIEREN TRABAJAR CON SPEEDEX?

GARANTÍA DE PRECISIÓN: CONFECCIÓN DEL MODELO DENTRO DE 7 DÍAS

La gran estabilidad dimensional de Speedex garantiza precisión durante 7 días desde la toma de la impresión hasta el momento de la generación del modelo.

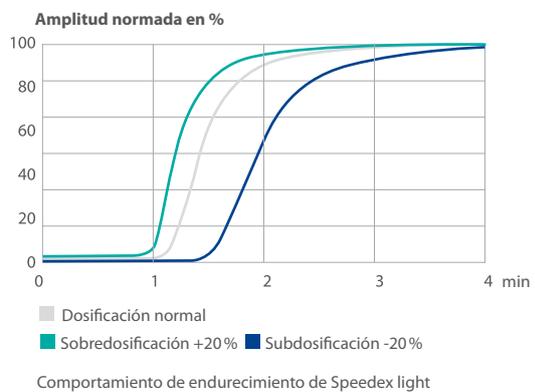
Gracias a su alta recuperación elástica y su gran reproducción de detalles, Speedex alcanza estándares de calidad similares a las Siliconas A.



TIEMPO DE TRABAJO CONTROLABLE

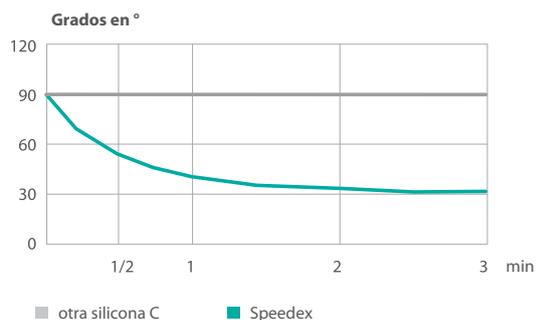
Con Speedex es posible adaptar los tiempos de trabajo a las diferentes técnicas de impresión con solo cambiar la dosificación del activador. El tiempo variable de fraguado de Speedex permite obtener una impresión precisa, en especial, a la hora de trabajar en prótesis parciales y totales.

Con dosificación normal de activador, Speedex tiene un fraguado rápido que simplifica el trabajo del operador y garantiza el confort del paciente.



PROPIEDADES HIDRÓFILAS: SUPERFICIE ACTIVADA!

Speedex garantiza una toma de impresión precisa en presencia de saliva u otros fluidos bucales, gracias a su superficie activada con un ángulo de contacto más bajo que cualquier otra Silicona C. Su química permite que pequeños surfactantes en su fórmula cambien su polaridad ante la presencia de humedad, permitiendo al producto desplazarla fuera de las preparaciones e imprimir directamente sobre los tejidos.



Fuente: datos internos

Speedex putty | Tiempo de fraguado $\geq 4:30$ min

$\leq 0:45$ min	$\leq 0:45$ min	$\geq 3:00$ min
$\leq 1:30$ min		
23°C		

Dureza final

Speedex	Shore A 24 h
light	52
medium	48
putty	66

altamente viscoso →

Fuente: datos internos

Información para pedidos

4970 EM **Speedex putty**
1 × 910 ml 1 unidad

4980 EM **Speedex light**
1 × 140 ml 1 unidad

4986 EM **Speedex medium**
1 × 140 ml 1 unidad

4990 EM **Speedex Universal Activator**
1 × 60 ml 1 unidad

3650 EM **Speedex Trial Kit**

4410 **Adhesivos Coltène®**
1 × 10 ml

4414 **Bloques mezcladores Coltène®**
10 unidades

4415 **Espátula mezcladora Coltène®**
1 unidad

4420 **Cuchillo recortador derecho**

4421 **Cuchillo recortador izquierdo**

4426 **Jeringas plásticas Coltène®**
3 unidades (incl. 15 puntas)

4428 **Puntas Coltène® para jeringas plásticas**
50 unidades

© 2013 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE®**